

**walk with confidence™**  
how to ensure the perfect fit

**marcher avec confiance™**  
comment assurer l'ajustement parfait

**caminar con confianza™**  
cómo asegurar el ajuste perfecto

Folding walkers are designed to help a person remain independent and mobile by providing assistance in walking

les marchettes pliables sont conçues pour aider les gens à rester indépendants et mobiles en leur fournissant de l'aide pour marcher

al proporcionarles cierto nivel de asistencia para caminar, el andador ayuda al usuario a moverse y permanecer independiente

Carex® offers several styles of folding walkers and accessories for easy mobility, maneuvering, and convenience

Carex® offre plusieurs styles de marchettes pliables et d'accessoires pour une meilleure mobilité, une meilleure manœuvre et commodité

la marca Carex® ofrece diversos estilos de andadores y una amplia variedad de accesorios para facilitar la maniobrabilidad y lograr mayor comodidad

## WALKERS WITH WHEEL ATTACHMENTS

### MARCHETTES AVEC DES ACCESSOIRES DE ROUES

turn a folding walker into wheeled walker for those who have difficulty lifting the weight of the walker.

la marchette pliable devient une marchette sur roues pour les gens qui ont de la difficulté en soulevant le poids de la marchette.

convierten el andador plegable en un andador rodante cuando la persona tiene dificultad para levantar el peso

**WEIGHT CAPACITY: 300 lb CAPACITÉ DE POIDS: 136 kg RESISTENCIA: 136 kg**

### 5" walker wheels

allows person to walk naturally by eliminating the need to lift walker

### roues de 5" pour la marchette

permet de marcher naturellement en éliminant le besoin de soulever la marchette ajustable



A839-00

### adjustable folding canes

come with convenient storage case  
folds compact for easy storage when traveling

### cannes pliables

avec étui pratique  
se plie complètement pour le stockage facile lors de voyages



A534-00



## HOW TO DETERMINE PROPER HEIGHT ADJUSTMENT


1. Extended arm forward at 30 degree bend at elbow. Measure from handgrip to the floor to determine walker height.
2. Adjust leg pin positions to match required height adjustment.

### AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR

1. Étendre le bras en avant en le pliant au coude à un angle de 30 degrés. Mesurer à partir de la poignée jusqu'au sol pour déterminer la hauteur de la marchette.
2. Ajuster les positions des goupilles des pattes pour le faire concorder avec l'ajustement de la hauteur.

### AJUSTE DE LA ALTURA

1. Extender el brazo hacia adelante con el codo doblado a un ángulo de 30 grados. Medir desde la empuñadura hasta el piso para determinar la altura del caminador.
2. Ajustar la posición de los pasadores de las patas para que concuerde con el ajuste de la altura necesario.

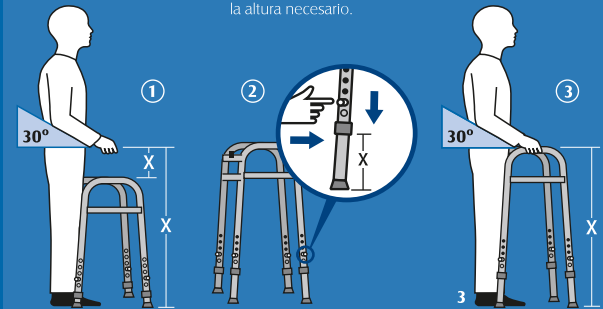


## Medicare (U.S. Only): HCPCS Codes

E0135 Walker, Folding without Wheels

E0143 Walker, Folding with Wheels

E0148 Walker, Heavy Duty

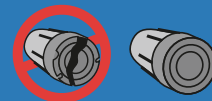

## TIP REPLACEMENT

Check tips periodically and replace if worn

### REEMPLAZO DE LOS REGATONES

Réviser les embouts périodiquement et les remplacer s'ils sont usés

### REEMPLAZO DE LOS REGATONES

Revisar periódicamente los regatones y reemplazarlos si están desgastados